

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)
LAVAGEM E DESINFECÇÃO DAS ALMOTOLIAS



UPAE- SERRA TALHADA



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP



LAVAGEM E DESINFECÇÃO DAS ALMOTOLIAS

SERRA TALHADA

Elaborado por:

Aprovado por:

Gabrielle Ferreira Leite Coelho
COREN: 468752
Atualizado: AGOSTO/ 2023

Flávia Figueiredo Petty

Marcelo Alexandre de Lima Coelho

1. DEFINIÇÃO

Realizar a remoção física por ação mecânica da sujidade, promovendo redução de microrganismos das superfícies das almotolias.

2. RESULTADO ESPERADO

- Processamento adequado de almotolias.

3. PESSOAS OU PROFISSIONAIS QUE IRÃO REALIZAR O PROCEDIMENTO

- Técnico de Enfermagem.

4. MATERIAIS A SER UTILIZADO

- Recipiente de plástico;
- Esponja macia;
- Detergente enzimático ou detergente neutro;
- Compressas limpas;
- Escovas de nylon para lavagem de tubos;
- Solução desinfetante;
- EPI's (Avental impermeável, luvas de cano longo, luvas de procedimento, máscara N95, e óculos de proteção.

5. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Higienizar as mãos;
- Paramentar-se com os EPI's ;
- Desprezar o conteúdo das almotolias na pia;
- Retirar os rótulos;
- Lavar as almotolias em água corrente com o auxílio da esponja e retirar do excesso de conteúdo;
- Diluir o detergente enzimático ou neutro de acordo com as recomendações do fabricante;
- Imergir as almotolias e as tampas dos recipientes plásticos, deixando-os totalmente imersos na solução;
- Deixar agir de acordo com as recomendações do fabricante;
- Retirar as almotolias e as tampas dos recipientes;
- Lavar em água corrente, individualmente com o auxílio de escovas;
- Deixar as almotolias e tampas com abertura para baixo, sobre uma compressa limpa, até secagem completa;

- Encaminhá-las para desinfecção por 30 minutos;

 SERRA TALHADA	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP		
	LAVAGEM E DESINFECÇÃO DAS ALMOTOLIAS		
Elaborado por:		Aprovado por:	
Gabrielle Ferreira Leite Coelho COREN: 468752 Atualizado: AGOSTO/ 2022		Flávia Figueiredo Petty	Marcelo Alexandre de Lima Coelho

- Retirar as almotolias e tampas e lavar em abundância;
- Encaminhar para secagem;
- Retirar as luvas e higienizar as mãos;
- Calçar luvas de procedimento;
- Secar com auxílio de compressa limpa ou com ar sobre pressão;
- Guardar após a secagem, em saco plástico transparente;
- Retirar as luvas e higienizar as mãos;
- Encaminhar para os setores.

6. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

Enfermagem em Centro de Materiais e Esterilização. Kazuko Uchikawa Graziano, Arlete Silva e Eliane Molina Psaltikids. Barueri; São Paulo: Manole, 2011;- Práticas recomendadas SOBECC, 5° ed, 2009.

