

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

### LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBU



**UPAE- SERRA TALHADA**



## LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBU

SERRA TALHADA

Elaborado por:

Aprovado por:

Gabrielle Ferreira Leite Coelho  
COREN: 468752  
Atualizado: AGOSTO/ 2023

Flávia Figueiredo Petty

Marcelo Alexandre de Lima Coelho

**1. DEFINIÇÃO**

Realizar a desinfecção do AMBU para prevenção de infecção.

**2. PESSOAS OU PROFISSIONAIS QUE IRÃO REALIZAR O PROCEDIMENTO**

- Enfermeiros e Técnico de Enfermagem.

**3. MATERIAIS A SER UTILIZADO**

- Ambu;
- Esponja macia;
- Glutaraldeído;
- Detergente;
- Compressa estéril;
- EPI (luvas de cano longo e de procedimento, óculos de proteção, máscara N95, avental impermeável);
- Água potável;
- Compressa macia.

**4. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS**

- Higienizar as mãos;
- Paramentar-se com os EPI's ;
- Desconectar as peças do ambu;
- Imergir o ambu em detergente enzimático de acordo com o tempo orientado pelo fabricante;
- Enxaguar com água em abundância;
- Deixar escorrer o excesso da água dos componentes e imergi- los na solução desinfetante durante 30 minutos;
- Retirar os componentes da solução em água abundante;
- Encaminhá- los pára a área de secagem;
- Retirar as luvas de cano longo e higienizar as mãos;
- Calçar as luvas de procedimento;
- Realizar secagem com pano macio e/ou ar sob pressão;
- Acondicionarem recipiente em saco plástico e identificar a data da desinfecção;
- Testar o funcionamento do ambu após a desinfecção;
- Na presença de bolsa ventilatória, limpar a parte externa da bolsa com o auxílio de compressa limpa e detergente enzimático, evitando a entrada de água no interior da bolsa;
- Retirar os EPI's e higienizar as mãos;

➤ Encaminhar para o setor.