

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ENDOSCÓPIOS



UPAE- SERRA TALHADA



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP



LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ENDOSCÓPIOS

SERRA TALHADA

Elaborado por:

Aprovado por:

Gabrielle Ferreira Leite Coelho
COREN: 468752
Atualizado: AGOSTO/ 2023

Flávia Figueiredo Petty

Marcelo Alexandre de Lima Coelho

1. DEFINIÇÃO

Realizar a desinfecção de endoscópios para prevenção de infecção.

2. PESSOAS OU PROFISSIONAIS QUE IRÃO REALIZAR O PROCEDIMENTO

- Enfermeiros e Técnico de Enfermagem.

3. MATERIAIS A SER UTILIZADO

- Esponja macia;
- Detergente enzimático;
- Fita Teste;
- Escovas macias;
- Solução desinfetante;
- Almotolia com álcool a 70% e em gel;
- Compressas Limpas;
- Lençol ;
- Pistolas pressurizadas;
- Lavadoras ultrassônicas;
- Cera para lente do aparelho;
- Lubrificante para válvulas do aparelho;
- Endoscópios;
- EPI's (Avental impermeável, luvas de cano longo, luvas de procedimento, máscara N95, e óculos de proteção.



SERRA TALHADA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP



LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ENDOSCÓPIOS

Elaborado por:


Aprovado por:

Gabrielle Ferreira Leite Coelho
COREN: 468752
Atualizado: AGOSTO/ 2022

Flávia Figueiredo Petty

Marcelo Alexandre de Lima Coelho

4. FLUXOGRAMA E DESINFECÇÃO DE APARELHOS DE ENDOSCOPIA

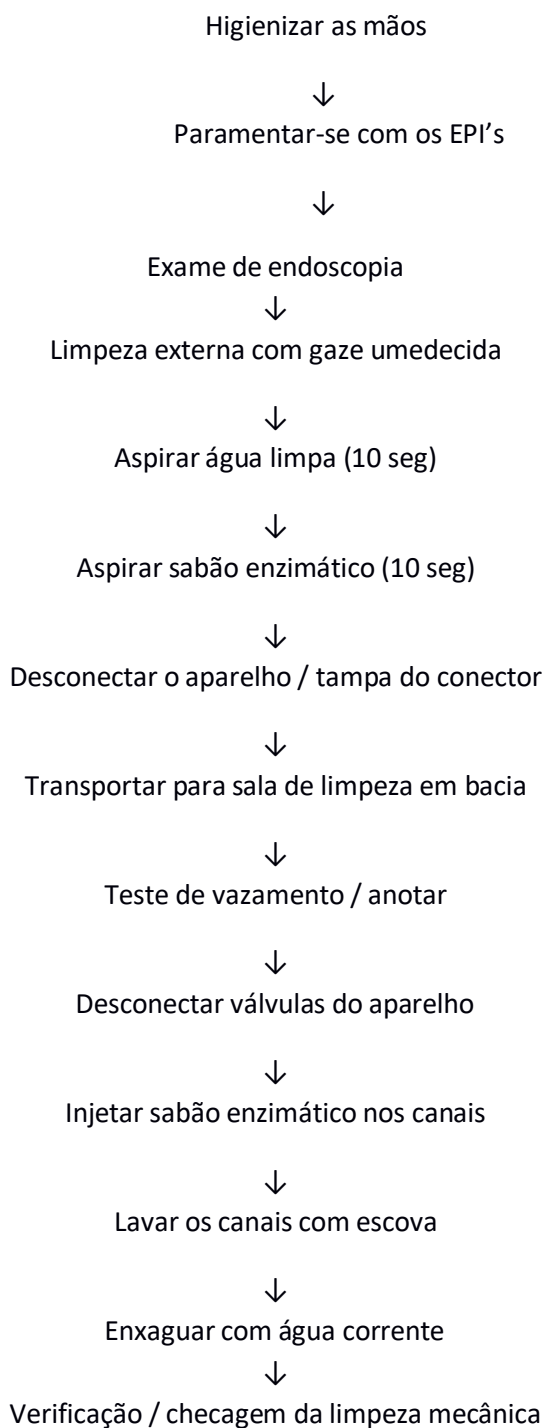



Secar internamente com ar comprimido / externamente com compressa



Desinfecção de alto nível (Ácido peracético 0,2%) / tempo de imersão suficiente (10 a 20 minutos)



Enxaguar com água corrente



Secar internamente com ar comprimido / externamente com compressa



Injetar álcool nos canais (2 ml) – na última desinfecção do dia



Armazenamento

5. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

1. Manual de Limpeza e Desinfecção de Aparelhos Endoscópicos- SOBEEG.

2. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). RESOLUÇÃO-RDC nº 6, de 1º de março de 2013. Dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os serviços de endoscopia com via de acesso ao organismo por orifícios exclusivamente naturais. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, nº 42, 4 de março de 2013, Seção 1, p. 44. Disponível em: <http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/integras_pdf/RES_ANVISA_DC_6_2013.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2017.

